

dentipur®

**Popolna linija izdelkov za
nego protez in zob**



Preverjena receptura s kamilicami in žajbljem

- brez alkohola
- brez konzervansov
- varčna uporaba



Napotki o navajanju na novo zobno protezo

1

Nova zobna proteza

Privajanje na novo zobno protezo zahteva nekaj potrpljenja, še toliko bolj, ker gre pravzaprav za tujek v ustih.

2

Otiščanci in vnetje

V prvih dneh nošenja proteze se lahko pojavijo otisčanci in vnetje, kar je lahko zelo boleče. V takem primeru je nega dlesni še posebej pomembna. Če bolečina ne pojenja, je priporočljivo, da se posvetujete z zobozdravnikom.

3

Težave pri govorjenju

Na začetku nošenja proteze se lahko pojavijo tudi težave pri govorjenju.

Te lahko odpravite z vajami glasnega branja in pogostim govorjenjem.



dentipur®
tablete

4

Žvečenje

Težave pri žvečenju lahko omilite, če v prvih dneh nošenja proteze jeste mehko hrano. Pomaga tudi, če so grižljaji majhni in žvečenje počasno.

5

Nega zobne proteze in ustna higiena

Nujno za dobro delovanje proteze in prilagajanje nanjo sta pravilna nega proteze in skrbna ustna higiena. Visokokakovostni izdelki Dentipur so razviti ravno za to.

6

Odlično prileganje za proteze

Včasih se zgodi, da se zobna proteza ne prilega več popolno. To pomanjkljivost lahko odpravite s kremo za pritrjevanje ali pritrdilnim praškom Dentipur.

dentipur®
lepilo



Nega zobne proteze

1

Čiščenje proteze s tabletami

Ostanki hrane so idealno gojišče za bakterije, ki v ustni votlini povzročajo zadah (halitozo) in vnetje. Zato sta dnevno čiščenje proteze in njena dezinfekcija zelo pomembna.



Tablete za čiščenje protez Dentipur zagotavljajo oboje – popolno očiščeno protezo in učinkovito dezinfekcijo v 15 minutah. Protezo lahko namočimo tudi čez noč.



2

Čiščenje proteze z zobno ščetko

Veliko zobozdravnikov priporoča tudi občasno čiščenje proteze s posebno zobno ščetko za proteze. Da bi se izognili poškodbam proteze, priporočamo poseben gel za čiščenje protez Dentipur:

- Je ekonomičen, deluje hitro, nežno in temeljito.
- Odstrani obloge in madeže, ki jih povzročajo tobak, kava, čaj, rdeče vino itd.
- Prepreči slab vonj proteze in zadah.

Uporaba

Na vlažno ščetko za proteze nanesite 1 ali 2 kapljici gela Dentipur. Ščetkajte 2 ali 3 minute, potem pa temeljito splaknite pod čisto vodo.

dentipur®
gel



dentipur® Popolna nega za



Negovalno olje Dentipur®

s kamilicami in žajbljem
za nego vnetih dlesni in neba

Prašek Dentipur®

za enostavno in stabilo pričvrstitev protez

Pričvrstilna krema Dentipur® premium

s kamilico in žajbljem. Izvrstna lepljivost
zagotavlja brezskrbnost ves dan.

proteze

***Ne pozabite
na redne preglede
pri svojem
zobozdravniku***

Čistilne tablete Dentipur®

za hitro in temeljito čiščenje ter dezinfekcijo
za nego protez in ortodontskih aparatov

Čistilni gel Dentipur®

za hitro in temeljito čiščenje
z zobno ščetko za proteze

dentipur®

Popolna nega za proteze



flegis

FLEGIS, d. o. o. Tel.: +386 (0)2 460 53 42
PE Maribor, Perhačeva ul. 36 Faks: +386 (0)2 460 53 43
2000 Maribor, Slovenija E-pošta: info@flegis.si

www.zdrav-nasmeh.com